

STERILANCE[®]
m e d i c a l
Innovation for Safety




SteriLance[™] Flex 3

Lanceta de seguridad ajustable


- 3 niveles de profundidad en 1 dispositivo
- Diseño ergonómico
- Aguja precargada, contacto activo.

 **Viralab S.A.**
Contribuyendo con la calidad de su Laboratorio

Instrucciones de uso

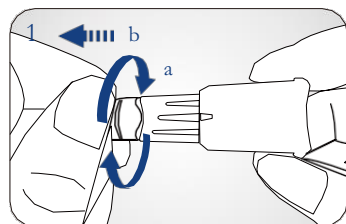


Gire la tapa y luego retirela cuidadosamente.

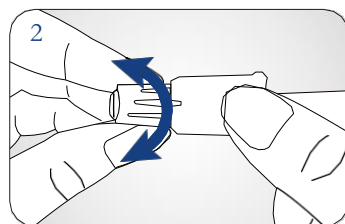


Gire la punta ajustable (parte blanca) para establecer la profundidad requerida.

- || Poca profundidad (1.3mm)
- || Profundidad media (1.8mm)
- || Gran profundidad (2.3mm)

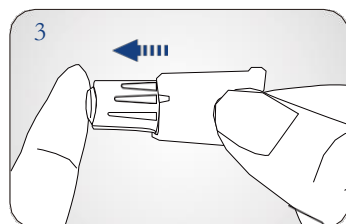


Coloque el cuerpo de la lanceta firmemente contra el lugar de la punción para activar el dispositivo.

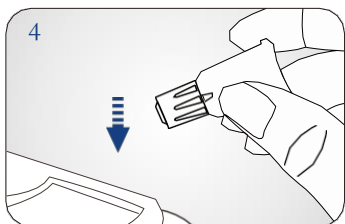

Deseche la lanceta usada en un recipiente adecuado para objetos punzantes.

Ajustador de profundidad
(Preestablecido en el medio)

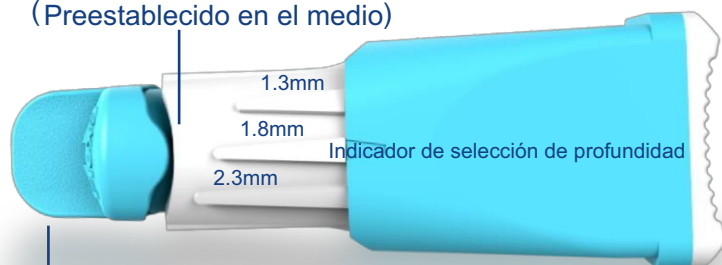

Ajustes de profundidad
(1.3mm/1.8mm/2.3mm)

Tapa de esterilidad

Información para ordenar.

Reorden #	05-1521A	05-1523A	05-1526A	05-1528A	05-1530A
Calibre	21G	23G	26G	28G	30G
Color	Plomo	Azul	Amarillo	Naranja	Rojo Rosa
Embalaje	100pcs/caja 10cajas/cajón or 1000pcs/cajón				

Diseño de tapa giratorio, para un uso cómodo.



STERILANCE[®]
medical
Innovation for Safety

NORTH AMERICA:
SteriLance Medical (USA) Inc.
337 Curie Drive Alpharetta, GA 30005
smu@sterilance.com
Tel: +1 877 768 8808 Fax: +1 678 254 1771

DISTRIBUIDO EN PERU POR:
VIRALAB SOCIEDAD ANONIMA
Avenida universitaria norte 2713 San Martín de Porres
-Lima-Perú Tel: (01) 7198508 // 973981915
viralabperu@viralabperu.com

CE FDA TÜV STERILE

SteriLance y el logotipo de SteriLance, easydrip y el logotipo de easydrip son marcas comerciales de SteriLance Medical